



iCTG Watcher 取扱説明書

1.画面遷移図	-----	1
2.操作方法	-----	2-4
①患者選択画面	-----	2
②施設一覧画面	-----	2
③検査一覧画面	-----	2
④グラフ表示画面	-----	3
⑤グラフ表示設定画面	-----	3
⑥検査情報画面	-----	3
⑦通知	-----	4
⑧メール通知	-----	4
3.サポート連絡先	-----	4

iCTGWatcherはクラウド上に保存されたiCTGの計測データを簡単に閲覧するためのアプリです。

連携病院がある場合、複数施設を切り替えながらデータが閲覧可能です。

同時に閲覧できるデータはひとつです。

複数台の同時計測でもグラフは、簡単な操作で切り替えが可能です。

【製造販売業者】

メロディ・インターナショナル株式会社

〒761-0301


香川県高松市林町2217-44 ネクスト香川304

Tel: 087-813-7362

Fax: 087-813-7361



画面遷移図

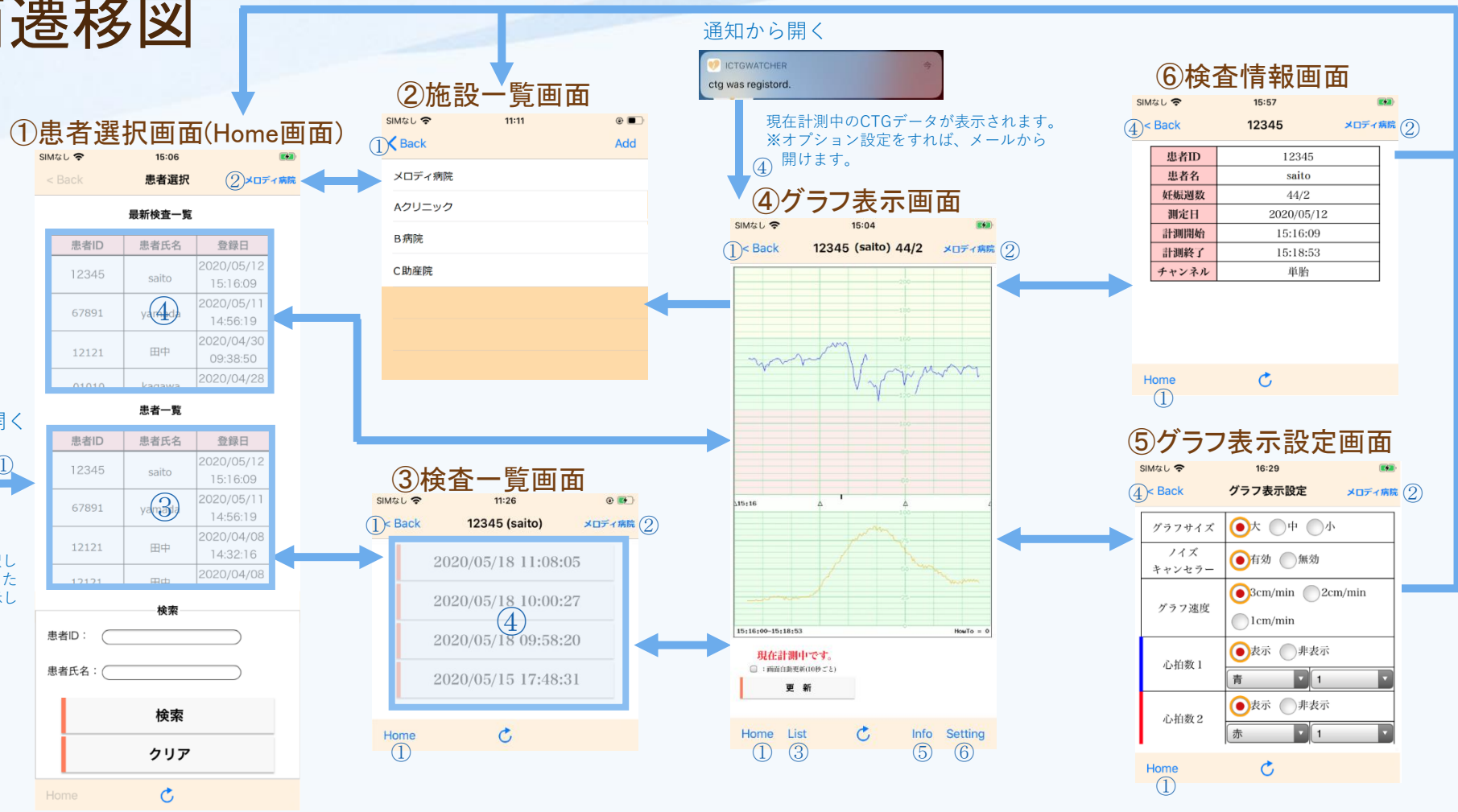

アプリから開く



患者や検査を選択して、すでに計測したCTGデータを表示します。

通知から開く



現在計測中のCTGデータが表示されます。
※オプション設定をすれば、メールから開けます。

①患者選択画面(Home画面)

アプリを起動すると、患者選択が表示されます。
患者および検査データを選択します。表の中はスクロールできます。

施設名

施設名をタップすると、②施設一覧画面へ移動します

最新検査一覧

(直近の計測データを日時降順で表示)
表示したい行をタップし、④グラフ表示画面へ移動します。
※計測データの日付降順になっている為
10データまで一覧に表示されます。

患者一覧

(直近に検査した患者の検査日降順)
表示したい行をタップすると③検査一覧画面へ移動します。

患者検索

患者のIDまたは患者氏名を入力し、“検索”をタップすると患者一覧表が検索した患者で絞り込みされます。
クリアをタップすると絞り込みは解除されます。



②施設一覧画面

施設一覧では担当する病院の管理をします。
表示する施設を選択します。

複数の病院を登録している場合、次回起動時には、最後に選択された病院の①患者選択画面が表示されます。

施設の追加・削除についてはサポート窓口
(4ページ)までご連絡ください。




③検査一覧画面

検査一覧では①患者選択画面で選択した患者の
検査履歴を表示します。

最新の検査が上に表示されます。

表示したいグラフの日時をタップすると、
④グラフ表示画面へ移動します。

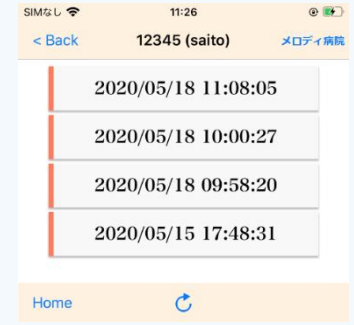

④ グラフ表示画面

グラフ表示画面では選択した検査のグラフを表示します。

Back

ひとつ前の画面へ戻ります。

Setting

⑤ グラフ表示設定画面へ移動します。

Info

⑥ 検査情報画面へ移動します。



画面の更新します。

List

③ 検査一覧画面へ移動します。

Home

① 患者選択画面へ移動します。



⑤ グラフ表示設定画面

グラフ表示設定ではグラフの設定を変更できます。

グラフ線の配色は下記の12色から選択できます。

【黒・赤・青・緑・明るい緑・水色・黄色・オレンジ・茶・灰・ピンク・紫】

グラフ線の太さは1~5段階まで変更可能です。各グラフ設定の表示、非表示を選択できます。

設定後は必ず”適用”ボタンをタップしてください。



⑥ 検査情報画面

検査情報画面ではグラフに表示中の検査の情報を確認できます。

※計測中、グラフ下部に「現在計測中です。」と表示されます。


画像自動更新のチェックボックスを外すと自動更新は停止します。

任意のタイミングで”更新”ボタンをタップし計測中のデータを更新してください。

⑦通知

計測開始から数秒後に画面上部に通知されます。

通知をタップすると④グラフ表示画面が表示され、該当の検査が閲覧できます。

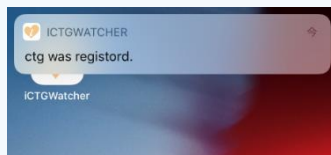

【使い方動画】▶



⑧メール通知(オプション)

登録されているメールアドレスに計測開始の通知をします。

アプリがインストールされていれば、メールのURLをタップするとアプリが自動的に起動し④グラフ表示画面が表示され、該当の検査が閲覧できます。

インストールされていない場合、ブラウザから該当の検査を閲覧できます。



サポート窓口

連携施設、メール先の追加など
その他にもご不明点ございましたら下記まで
お問い合わせください。

受付時間：平日9:00~18:00
Tel: 087-813-7362
Email: support@melody.international